



LL65200 Tvåspann – lyftremmar inkl karbinhakar – avsedda att kopplas till personlyftar med två krokar och kombineras med bärsitsen/lyftselen Lätta Lyft. Hakarna är av bästa kvalitet, används av bergsklättrare. Information om vilka kombinationer som är godkända finns på webbversionen, Kombinationer lyftselar – personlyftar, www.hmcv.se




Så här används Tvåspannet

Justera sittställningen genom att flytta hakarna upp eller ned i öglorna som finns på remmarna. Öglorna i toppen sätts fast i bygelns krokar. Om du vill sitta rak i ryggen eller luta bakåt beror på vilka öglor du väljer. Prova dig fram till rätt sittställning. Det ska kännas säkert och skönt.

Öglorna ska sitta utåt på Tvåspannet i förhållande till kroppen. Den släta sidan ska ligga inåt. För att inte remmarna bak ska trycka finns skydd som kan flyttas i höjdlid. Den längre delen på skyddet ska täcka haken och ligga mot kroppen. När höjd och lutning är inställda och sittställningen känns bekväm ska remmarna helst hänga kvar i personlyften. Då är det enkelt att koppla ihop Tvåspannet med handtagen i Lätta Lyft bärsits/lyftsela som du redan sitter i.

Karbinhakarna sätts fast i lyftsels handtag med öppningen på haken framåt. De sätts på utifrån och in. Detta är viktigt, annars vrider sig remmarna inne i skydden.

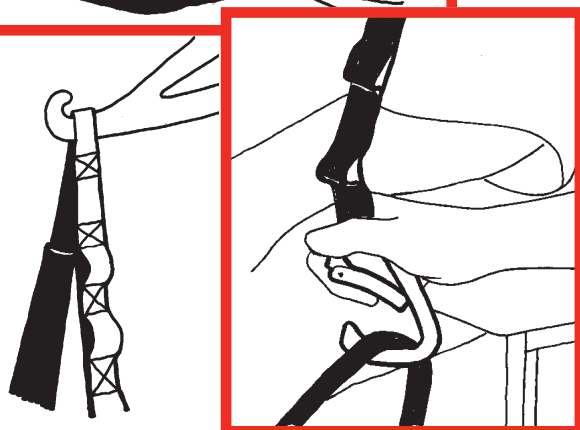

Tvåspannet används till personlyftar med byglar som har två krokar.

Mer information finns att hämta under respektive rubriker på www.lattalyft.se, [facebook.com/lattalyft](https://www.facebook.com/lattalyft) eller ring Svart på Vitt AB, 0302-468 40 Ulla Lindeberg.

Garanti 2 år från fakturadatum. Kontrollera att Tvåspannet inte får några defekter. Om skador uppstår ska remmarna bytas ut. Produkten är testad hos Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Borås. CE-märkt. Tillverkas i Sverige.

Svart på Vitt Reklam och Design AB / Lätta Lyft made in Sweden
Box 4067 443 12 Gråbo Tel 0302-46840 +46 707 525820
www.lattalyft.se www.facebook.com/lattalyft